

## 4x rood knipperen van uw Aivia AED kast

Indien de Aivia kast 4 rood knippert geeft deze hiermee aan dat er een afwijking is geconstateerd in de temperatuur instelling: de gemeten temperatuur ligt buiten de opgegeven waardes.

Dit is makkelijk op te lossen d.m.v. de onderstaande instructie.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de standaard onderhoudscode zoals die al geprogrammeerd staat : 1111.

Indien u de onderhoudscode in het verleden heeft gewijzigd dient u deze te gebruiken.

### Invoeren verwarmings temperatuur

1111V

Kast open

103V

5V

Kast dicht

### Meldings temperatuur wijzigen

1111V

Kast open

101V

3V

Kast dicht

Met deze instellingen gaat de verwarming aan onder de 5 graden en komt de kast pas met een melding als de temperatuur onder de 3 graden komt.