

Vervangen van de electronica (bracket)

Maak eerst de kast spanningsloos.
Dit kan door de netstekker uit de wandcontactdoos te verwijderen of door de connector (foto 2) los te maken van de printplaat.

Deze kunt u vinden achter de afdekplaat rechts in de kast. (foto 1)



Foto 1

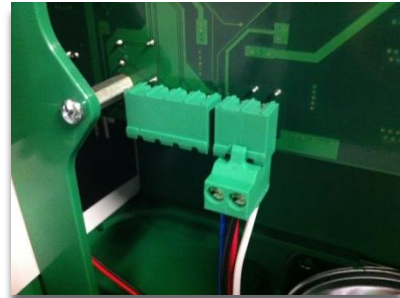


Foto 2

Klik daarna met behulp van een schroevendraaier voorzichtig de 2 bevestigingslipjes boven (foto 3) en één bevestigingslip onder (foto 4)



Foto 3



Foto 4

Als deze los zijn gemaakt kan de bracket naar voren geschoven worden om daarna iets naar links te kantelen (foto 5) zodat de bedrading los gemaakt kan worden.

Belangrijk is om even te noteren hoe de bedrading is aangesloten zodat deze op de nieuwe bracket weer op de juiste plaats komt. Zodra de bekabeling is aangesloten op het vervangen onderdeel kan de bracket weer op zijn plaats worden geschoven.

Let op dat u de bracket onder in de gleuf plaatst en dat er bij het vastzetten geen bekabeling in de weg zit.

Duw de bracket zover naar achteren zodat de bevestigingslippen vastklikken.



Foto 5

Als dit is gedaan kan de spanning weer op de kast gezet worden.

Wijzigen van de codes.

Na vervanging van het bracket kan het mogelijk zijn dat de toegangscode aangepast moeten worden.

Dit kunt u doen op de volgende manier:

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de standaard onderhoudscode zoals die al geprogrammeerd staat : 1111

Gebruikerscode wijzigen:

1111V

Kast openen

03V

Nieuwe code V

Kast dicht

Onderhoudscode wijzigen:

1111V

Kast openen

04V

Nieuwe code V

Kast dicht