

## Montage handleiding Aivia power supply adapter


Om uw Aivia kast van stroom te voorzien dient u eerst de groene connector aan te sluiten aan de power supply adapter (afb. 1.)

De power supply adapter vindt u in de doos, de groene connector is bijgesloten in de kast.

De rood/blauwe bedrading monteert u links, de zwart/witte bedrading rechts (Afb. 2.)



Afb. 1.

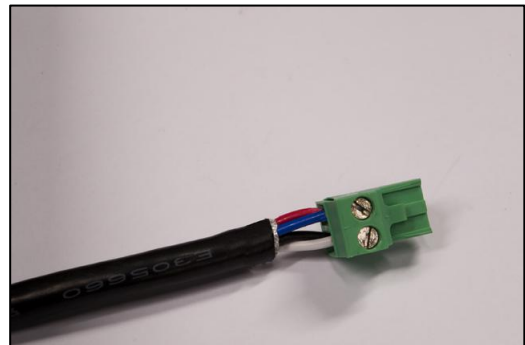

Afb. 2.

Als dit is gebeurd kunt u de Aivia kast van stroom voorzien door middel van het aansluiten van de groene Aivia connector (afb. 2.) op de daarvoor bestemde plaats in de kast.

Zie hiervoor ook de beknopte handleiding van Aivia welke met uw AED kast is meegeleverd.