

Installatie van de elektroden

1. Open het deksel van de AED
2. Plaats de verpakking met de elektroden in het deksel zodat het etiket met de uiterste gebruiksdatum zichtbaar is door het venster in het deksel.
3. Sluit de connector aan.

Installation des électrodes

1. Soulevez le couvercle du DEA.
2. Placez le paquet d'électrodes dans le couvercle de sorte que l' étiquette d'expiration soit visible par la fenêtre du couvercle.
3. Branchez le connecteur

Pad Installation

1. Open the lid of the AED.
2. Place the pad package into the lid so that the expiration label is visible through the clear window on the lid. The expiration date of the pads will then be readable without opening the lid of the AED.
3. Plug in the connector.

