


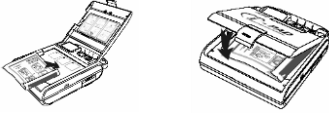


RICHTLIJNEN VERVANGING BATTERIJ EN ELEKTRODE i-PAD AED

Oude batterij vervangen	
Verwijder het gebruikte accupack. Open het slot door de sluitingsmechanismen naar elkaar toe te trekken en tegelijkertijd het accupack uit het compartiment te trekken.	
Stop het nieuwe accupack met de label naar boven en de richting aangegeven door de begeleidingspijl afgedrukt op de label.	
Druk het helemaal naar binnen toe totdat u een sluitende mechanische klik hoort.	
<p>Wanneer het nieuwe accupack juist werd geïnstalleerd zal het toestel een zelftest doorlopen.</p> <p>Volg de gesproken instructies van het toestel:</p> <ul style="list-style-type: none">• Druk nu op de knipperende oranje knop• Druk op de knipperende blauwe i-knop <p>Indien deze test juist is uitgevoerd zal de status LED groen knipperen, aangevend dat het toestel gebruiksklaar is.</p> <p>Indien de autotest een fout gedetecteerd heeft zal de status LED rood knipperen en zal het toestel u gesproken instructies geven. Neem bij technische problemen of vragen contact op met ons servicenummer 0032 (0)470/066 496</p>	
Gooi de oude accu meteen na vervanging weg. Houdt u aan de lokale wetgeving m.b.t. het weggooien van accu's.	

Oude elektrode vervangen	
Gooi de oude elektrode meteen weg om gebruik ervan te vermijden.	
Plaats de nieuwe elektrode in zijn gesloten verpakking op het frontpaneel van de i-PAD en doe het deksel naar beneden.	
Verifieer regelmatig of de elektrode niet verlopen is. De uiterste houdbaarheidsdatum vindt u op een sticker die op de buitenkant van de verpakking is aangebracht.	