


Vervangen van de batterij van de Philips HeartStart HS1 AED


Haal de batterij uit de verpakking. Plaats hem in de batterijruimte aan de achterkant van de defibrillator.

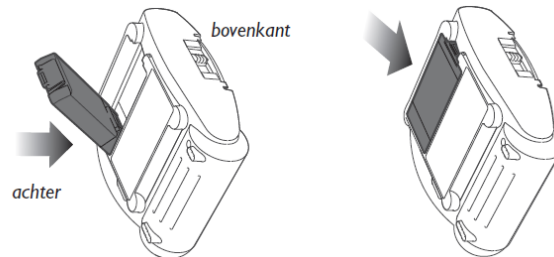

De HeartStart voert automatisch een zelftest uit zodra de batterij geïnstalleerd wordt. Druk op de knipperende schokknop als daarom gevraagd wordt. Nadat de zelftest voltooid is, meldt de defibrillator de status en wordt u gevraagd op de groene aan/uit-knop te drukken als er een noodgeval is. *(Druk niet op de groene knop, tenzij er van een werkelijke noodsituatie sprake is.)* Vervolgens gaat de defibrillator uit en komt hij stand-by te staan. Het groene Klaar-lampje knippert om aan te geven dat de HeartStart gereed is voor gebruik.

Vervangen van elektrodecassette bij de Philips HeartStart HS1

1. U kunt een gebruikte cassette vervangen of een andere cassette inbrengen door de vergrendeling op de bovenrand van de defibrillator opzij te schuiven. De elektrodecassette komt vrij. Til de cassette uit het apparaat en vervang hem zoals beschreven in stap 2 en 3

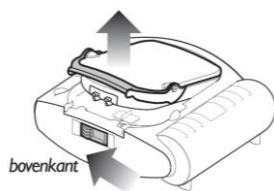

2. Haal de nieuwe SMART elektrodecassette uit de verpakking
3. Steek de cassette in de cassetteopening aan de voorkant van de defibrillator. Als de cassette goed ingestoken is, hoort hij op zijn plaats te klikken. Het groene TREKKEN-handvat moet helemaal omlaag staan.

