




De CHARGE-PAK batterijoplader vervangen


De CHARGE-PAK batterijoplader vervangen:

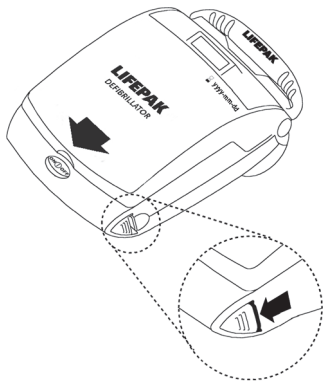


- 1 Druk (in de richting van de pijl) op de **ontgrendelknop** om de gebruikte batterijoplader te verwijderen. De batterijoplader springt tevoorschijn uit de defibrillator.

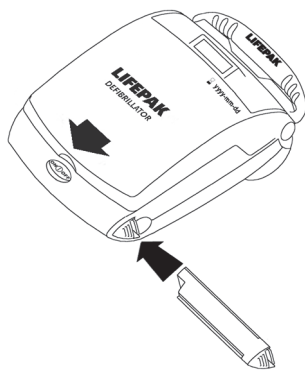

- 2 Steek de nieuwe batterijoplader in de defibrillator en duw de oplader aan totdat u hem hoort vastklikken.
- 3 Controleer of het -symbool verdwijnt en of het **OK**-symbool op het display verschijnt.

Opmerking: Als het -symbool verschijnt nadat u de batterijoplader hebt vervangen, heeft de interne batterij meer tijd nodig om volledig te worden opgeladen. Dit kan maximaal drie dagen duren als u de defibrillator lange tijd aan heeft gehad of als u veel schokken heeft afgegeven. Het **OK**-symbool verschijnt als de interne batterij volledig is opgeladen.

Let op: Probeer bij een acuut noodgeval de defibrillator toch te gebruiken, ook als het -symbool zichtbaar is.


LET OP!

Houd de defibrillator op een temperatuur tussen 0° – 50°C terwijl de nieuwe batterijoplader de interne batterij oplaadt. Bij lagere temperaturen wordt de interne batterij mogelijk niet goed opgeladen. Als de interne batterij langer dan zeven dagen wordt bewaard bij een temperatuur van meer dan 50°C, kan deze permanent worden beschadigd.


Een gebruikte batterijoplader ontladen en weggooien:




- 1 Steek de ontlader in de gebruikte batterijoplader.

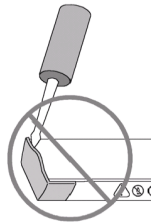

Opmerking: Als de ontlader eenmaal op zijn plaats zit, moet u deze niet meer verwijderen.

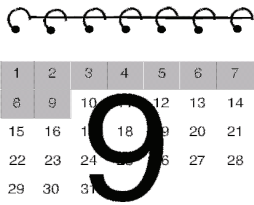


- 2 Laat de ontlader de gebruikte batterijoplader helemaal ontladen. Wacht minstens 9 dagen.

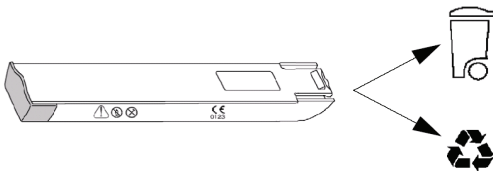

- 3 Gooi de gebruikte batterijoplader bij het afval of recycle deze.

Vervangen van de QUIK-PAK elektrodeverpakking

De QUIK-PAK elektrodeverpakking vervangen:

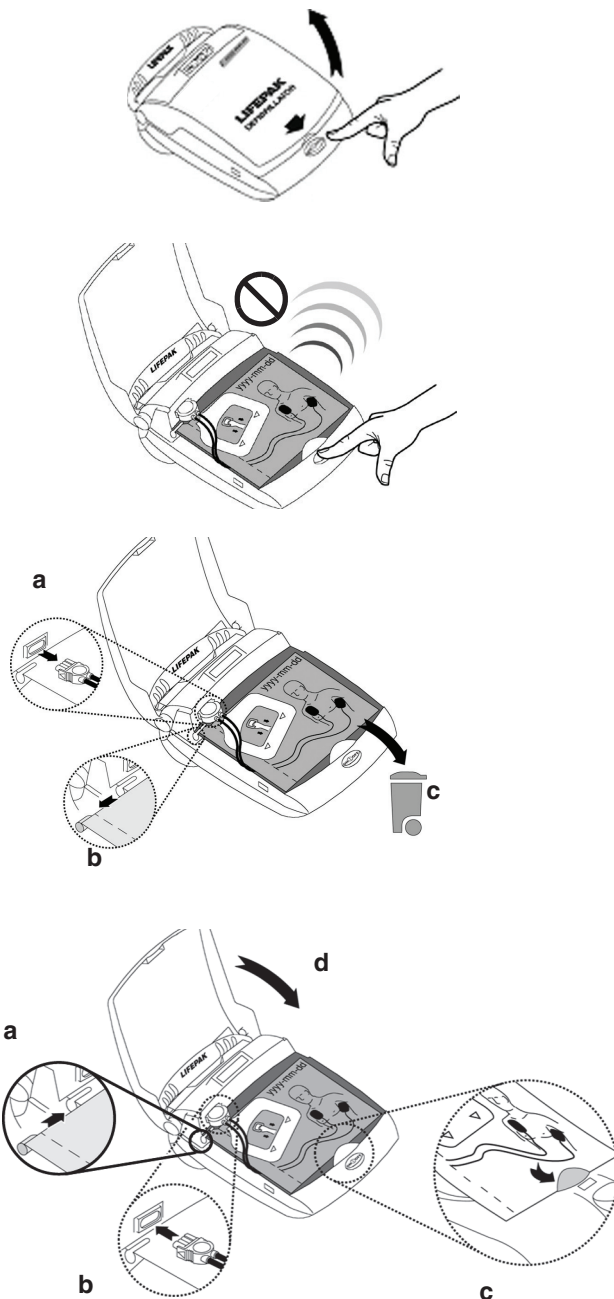

1 Druk op de AAN/UIT-knop om het deksel van de defibrillator te openen. Er klinken stemmeldingen.

2 Druk ongeveer 2 seconden op de AAN/UIT-knop om de defibrillator uit te zetten en energie te besparen.

3 De verouderde of gebruikte elektrodeverpakking verwijderen:

a Haal de elektrodeconnector uit de contactbus op de defibrillator.

b Schuif de vergrendelingspin uit de sleuf.

c Verwijder de verouderde of gebruikte elektrodeverpakking volgens de plaatselijke milieuvorschriften.

4 Een nieuwe elektrodeverpakking plaatsen:

a Schuif de vergrendelingspin in de sleuf.

b Steek de elektrodeconnector in de contactbus op de defibrillator.

c Zorg ervoor dat de nieuwe elektrodeverpakking in het midden van de defibrillator zit en achter het lipje is weggestopt voordat het deksel wordt gesloten.

d Sluit het deksel. Controleer of de uiterste gebruiksdatum van de verpakking in de rechterboven-hoek zichtbaar is.